


► EN Pump Set | DE Pumpset | FR Set pour tire-lait | IT Set per tiralatte | NL Afkolfset

Before using for the first time | Vor dem ersten Gebrauch | Avant la première utilisation | Prima del primo impiego | Voorafgaand aan het eerste gebruik


- 1**
- I Check all parts for damage
 - I Alle Teile auf Beschädigung kontrollieren
 - I Vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée
 - I Controllare l'eventuale danneggiamento dei componenti
 - I Controleer alle onderdelen op beschadiging



- 2**
- I Wash parts thoroughly
 - I Teile gründlich reinigen
 - I Nettoyez les pièces intégralement
 - I Lavare accuratamente i componenti
 - I Was de onderdelen zorgvuldig

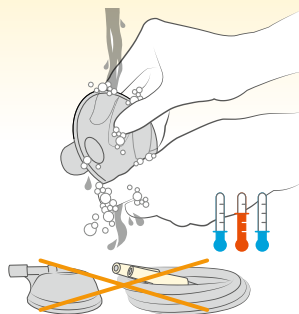

- 3**
- I Boil at least for 5 minutes
 - I Mindestens 5 Minuten kochen lassen
 - I Laissez bouillir au moins 5 minutes
 - I Fare bollire per almeno 5 minuti
 - I Kook ze tenminste 5 minuten uit

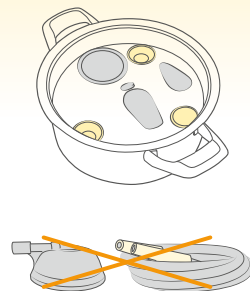


Please refer to instructions for use for more detailed information | Weitere Informationen erhalten Sie in der Gebrauchsanweisung | Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous référer au mode d'emploi | Per informazioni più dettagliate far riferimento alle istruzioni per l'uso | Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing

PersonalFit™ PLUS



► **EN** Breast shield | **DE** Brusthaube | **FR** Téterelle | **IT** Coppa per il seno | **NL** Borstschild

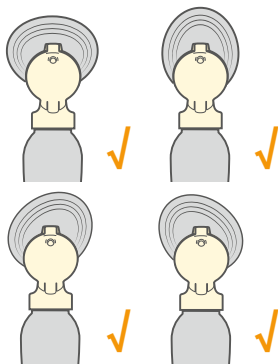

► The PersonalFit PLUS breast shield is oval and can be rotated (360°) and placed in the desired position which is most comfortable for you.

► Die PersonalFit PLUS Brusthaube ist oval und kann gedreht (360°) und in der gewünschten Position, die für Sie am angenehmsten ist, angebracht werden.

► La téterelle PersonalFit PLUS est ovale. Vous pouvez la faire pivoter (360°) afin de la placer dans la position la plus confortable pour vous.

► La coppa per il seno PersonalFit PLUS è ovale e può essere ruotata (360°) e indossata nella posizione che risulta più confortevole.

► Het PersonalFit PLUS borstschild is ovaal en kan worden gedraaid (360°) in elke gewenste positie welke het meest comfortabel is voor jou.

► **EN** Storage of breast milk

DE Aufbewahren von Muttermilch

FR Conserver le lait maternel

IT Conservazione di latte materno

NL Moedermelk bewaren

	16–26°C 60–78°F		≤ 4°C ≤ 39°F		-18 – -20°C 0 – -4°F
	≤ 6 h		≤ 5 d		≤ 180 d (-18°C/ 0°F) ≤ 365 d (-20°C/-4°F)
	≤ 4 h		≤ 4 d		≤ 90 d