

# A solução certa para mães que amamentam?

**A amamentação é uma das coisas mais naturais que uma mãe pode fazer pelo seu bebé.**

A Medela trabalha com cientistas da Universidade da Austrália Ocidental (University of Western Australia - UWA) há mais de 30 anos, para conseguir compreender na totalidade esta relação única e emocional. Esta colaboração próxima resultou numa contribuição significativa para o desenvolvimento de um entendimento da interacção entre mãe e bebé durante o período de amamentação.

A investigação mais recente explorou os padrões de alimentação dos bebés quando mamam. Descobriu-se que o vácuo tem um papel fundamental na capacidade do bebé se alimentar com sucesso e que a posição do mamilo na boca também é importante. O mamilo não chega à junção entre o palato duro e o mole, e uma combinação de movimentos da língua e do maxilar permitem o desenvolvimento de um comportamento de alimentação singular. Uma técnica individual de sugar, engolir e respirar assegura uma transferência de leite bem sucedida.

Esta informação conduziu ao desenvolvimento de um produto revolucionário para a alimentação, cientificamente comprovado, que permite que o bebé aplique a mesma técnica de alimentação que aprendeu a mamar.



## **Porquê a Calma?**

Uma tetina convencional obriga o bebé a alterar o comportamento natural de alimentação estabelecido. Mesmo que o bebé não esteja activamente a sugar, o leite corre livremente e o bebé tem de interromper o fluxo de leite para parar e respirar.

Esta alteração completa do comportamento é a principal razão por que muitos bebés resistem inicialmente a aceitar uma tetina convencional e depois a regressar ao mamilo. Para evitar que isso aconteça, desenvolvemos uma nova solução de alimentação: a Calma.

Com Calma, o leite só flui se o bebé se esforçar e criar vácuo para retirar o leite. Isso permite-lhe usar o comportamento de alimentação aprendido a mamar com a tetina Calma.



### **Calma**

| solução para alimentação – incluindo tampa protectora e uma multi-tampa



### **Calma com biberão de 150 ml**

| tampa protectora e duas multi-tampas



## Porquê oferecer uma solução deste género às mães?

Muitas mães modernas regressam ao emprego ou, na sociedade activa de hoje, nem sempre podem estar por perto na hora da mamada. Mamar é sempre a melhor opção, mas quando uma mãe precisa de uma alternativa para dar o seu leite materno extraído, Calma é a melhor solução. Calma ajusta-se no sítio certo na boca do bebé e encoraja-o a alimentar-se com o comportamento de alimentação que aprendeu naturalmente.

O comportamento utilizado a mamar desenvolve-se e muda à medida que o bebé cresce; o mesmo acontecerá com Calma. Por isso, Calma responde às necessidades do bebé ao longo de todo o período de amamentação. A técnica de sucção, deglutição e respiração permite uma alimentação calma e relaxada. Quer esteja a mamar ou a utilizar a Calma: o leite só flui quando o bebé se esforça por ele.

### O LEITE FLUI

- | Língua para baixo
- | Vácuo elevado

### NÃO HÁ SAÍDA DE LEITE

- | Língua para cima
- | Vácuo reduzido



Mamilo



Calma




## Com a Calma:

- | a mãe só precisa de um tipo de tetina para todo o período de amamentação.
- | o bebé pode alimentar-se, parar e respirar regularmente.
- | o leite não fluirá a menos que seja criado vácuo.
- | o fluxo de leite pára quando o bebé relaxa para fazer uma pausa e respirar.
- | o ritmo natural de sucção do bebé será mantido, permitindo uma transição fácil de volta ao mamilo.

[www.ready-4-calma.com](http://www.ready-4-calma.com)

## Vantagens técnicas da Calma

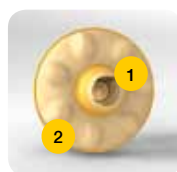

### Orifício para passagem do leite

- 1 O fluxo de leite é regulado pelo vácuo criado pelo bebé e controlado pelo sistema de controlo do fluxo de leite.



### Bossas suaves

- 2 As bossas suaves evitam que a camada exterior da tetina colapse e ajudam a estabilizá-la.



### Sistema de ventilação

- 3 O biberão é ventilado por um sistema de entrada de ar; a libertação do leite não está relacionada com ar força com que a tetina está enroscada.



### Multi-tampa (com 2 funções)

- 4 Fecha o biberão de forma estanque para evitar derrames.

### Calma

- 5 Mantém-na limpa durante o transporte.

### Tampa protectora

- 6 Protege a ponta da Calma.

### Contacto local

## Para mais informações, contactar:

VENDAS INTERNACIONAIS  
 Medela AG, Medical Technology  
 Lättichstrasse 4b  
 6341 Baar / Suíça  
 Telefone +41 (0)41 769 51 51 / Fax +41 (0)41 769 51 00  
 ism@medela.ch / [www.medela.com](http://www.medela.com)