

*No. 1 choice
of hospitals
& mothers*

Calmita

Solução de alimentação hospitalar baseada em investigação



Concebida para estimular
o desenvolvimento da
alimentação oral neonatal

- I Antecipação da alta hospitalar
- I Comportamento de alimentação natural
- I Aumento da amamentação no hospital
- I Fiável, segura e fácil de usar

Calmita é uma solução de alimentação hospitalar, baseada em investigação, que permite que recém-nascidos treinem e mantenham o seu comportamento de sucção natural e individual. Ao permitir uma fixação e técnica de alimentação similares às que acontecem durante a amamentação, a solução Calmita apoia e protege a amamentação.

A melhoria das capacidades de alimentação oral acelerará não apenas a alimentação por sucção nutritiva completa, mas pode reduzir igualmente o tempo de permanência no hospital. Também irá reduzir o risco de infeção nosocomial, reduzir o encargo financeiro para as famílias e para a sociedade, permitir que a unificação familiar se realize mais cedo e facilitar o desenvolvimento de uma interação e ligação mais apropriadas entre a mãe e o bebé.



Segurança

A válvula controlada por vácuo permite ao bebé sugar, engolir, fazer pausas e respirar durante a alimentação, apoiando um comportamento de alimentação semelhante ao que acontece durante a amamentação. O bebé pode, portanto, decidir quando quer beber e quando quer descansar.

Desenvolvimento de capacidades

A solução Calmita está disponível em duas versões, nas quais os diferentes níveis de vácuo da válvula refletem o desenvolvimento da capacidade de alimentação por sucção oral no bebé. Isto possibilita o treino do comportamento de alimentação do bebé, que desenvolve gradualmente as suas capacidades. A transição da alimentação entérica para a alimentação oral pode ser acelerada e a duração da estadia no hospital reduzida.

Ventilação

A ranhura de ventilação da solução Calmita permite a entrada de ar no frasco, de modo a equalizar a pressão no interior do mesmo. O macio anel de vedação assegura a fixação à prova de vazamento característica da gama de frascos para leite materno descartáveis Medela.

Tamanho e forma

O tamanho da ponta da tetina da solução Calmita foi definido tendo em conta as dimensões do palato duro do feto à 32.ª semana. A forma da solução Calmita e o raio da sua base foram concebidos para permitir diferentes posições de pega, para atender ao desenvolvimento orofacial individual de cada bebé.

Material


A ponta da solução Calmita é feita de elastómero termoplástico macio (TPE). Na base da solução Calmita, o elastómero é apoiado por uma camada de polipropileno (PP). Todos os materiais usados são isentos de BPA, látex e DEHP.

Aplicação

Para preencher o intervalo de tempo até que o bebé possa ser totalmente amamentado, a solução Calmita está adequada para leite humano, para leite humano reforçado e para leite de substituição líquido ou em pó bem dissolvido.

Conforto

A solução Calmita é um produto descartável de utilização única. É entregue em embalagens individuais, prontas a usar, sem necessidade de limpeza. A solução Calmita permite ao bebé ser alimentado com um frasco para leite, de uma forma natural e ao seu próprio ritmo, sem os problemas habituais de fluxo de leite contínuo.

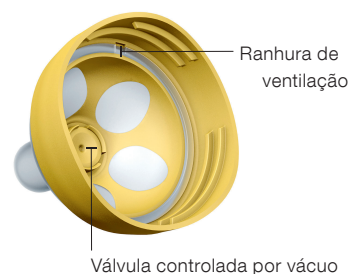

Calmita Starter (branca)

I nível reduzido de limiar da válvula controlada por vácuo



Calmita Advanced (amarela)

I nível moderado de limiar da válvula controlada por vácuo

Número de referência para encomenda da solução Calmita

Solução Calmita para alimentação hospitalar			
Número do artigo	Produto	Material ¹⁾	Qtd
008.0257	Calmita Starter	PP, TPE	260
008.0258	Calmita Advanced	PP, TPE	260

¹⁾em contacto com o leite humano

Saiba mais em www.medela-calmita.com ou queira contactar o seu representante local da Medela.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
Phone +41 (0)41 769 51 51
www.medela.com, ism@medela.ch

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918 Badalona (Barcelona), Spain
Phone 808 203 238
www.medela.pt, info@medela.pt

Nota: Este documento não é aplicável ao mercado dos Estados Unidos da América.

© Medela AG/200.7464/2014-03/A